

## **Bedienungsanleitung für Intimgleitgele**

### **Produktbeschreibung**

Die Intimgleitgele wurden speziell entwickelt, um vaginale Trockenheit zu lindern, die körpereigene Lubrikation zu unterstützen und die natürliche Gleitfähigkeit zu verbessern. Sie sind sowohl zur vaginalen als auch zur analen Anwendung geeignet und tragen zur Erhöhung des Wohlbefindens während des Intimverkehrs bei. Die Gleitgele eignen sich für den täglichen Gebrauch und können in Kombination mit Kondomen verwendet werden.

### **Vaginale Anwendung**

Die Intimgleitgele unterstützen die natürliche Gleitfähigkeit der Vagina, indem sie die Feuchtigkeit erhöhen und die Reibung beim Intimverkehr verringern. Sie sind für alle sexuell aktiven Personen (Frauen/Männer/divers) geeignet und sorgen für ein angenehmeres Empfinden während des Geschlechtsverkehrs.

### **Anwendung:**

1. Entnehmen Sie die gewünschte Menge des Gleitgels.
2. Tragen Sie das Gel auf die äußere Haut des Penis oder der Vagina auf.
3. Bei Verwendung mit einem Kondom: Tragen Sie das Gleitgel auf das bereits angelegte Kondom auf.
4. Nach Bedarf wiederholen. Das Produkt kann mehrfach während des Geschlechtsverkehrs aufgetragen werden.

### **Anale Anwendung**

Das Intimgleitgel reduziert die Reibung und trägt zur Vorbeugung von Analfissuren bei. Es minimiert das Risiko von Kondomrissen und sorgt für eine geschmeidigere Gleitfähigkeit im Analbereich. Auch bei analer Anwendung kann es für alle Geschlechter verwendet werden.

### **Anwendung:**

1. Geben Sie eine kleine Menge des Gleitgels auf den Anus und/oder Penis.
2. Bei der Verwendung mit Kondomen: Tragen Sie das Gleitgel auf das angelegte Kondom auf.
3. Bei silikonbasierten Gleitgelen empfiehlt es sich, mit einer kleineren Menge zu beginnen, da das Produkt sehr ergiebig ist.

### **Warn- und Sicherheitshinweise:**

- **Kontakt mit Augen vermeiden:** Falls das Gel in die Augen gelangt, sofort mit Wasser ausspülen.

- **Nicht auf gereizter Haut anwenden:** Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sollte die Anwendung sofort gestoppt und ein Arzt konsultiert werden.
- **Nur äußerlich anwenden:** Das Gleitgel ist nicht für die orale Einnahme oder als Verhütungsmittel geeignet.
- **Außer Reichweite von Kindern aufbewahren:** Lagern Sie das Produkt sicher, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- **Kein Spermizid:** Das Produkt bietet keinen Schutz vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektionen.
- **Rutschgefahr:** Das Gel kann auf glatten Oberflächen (z. B. Fliesen) eine Rutschgefahr darstellen. Vermeiden Sie den Kontakt mit solchen Oberflächen und wischen Sie Verschüttungen sofort auf.
- **Auf Verträglichkeit testen:** Vor der ersten Anwendung eine kleine Menge auf der Haut testen, um allergische Reaktionen auszuschließen.

#### **Lagerung:**

Bewahren Sie das Intimgleitgel kühl und trocken auf. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

**Hinweis:** Dieses Produkt dient ausschließlich der Erhöhung des Wohlbefindens beim Geschlechtsverkehr und bietet keinen Schutz vor ungewollten Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten.